

Kamermodule met
signaallamp en
bedidentificatie
2921 ..

GIRA

Oproepsysteem 834

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie-
systemen
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald
Germany
Tel. +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-339
www.gira.nl
info@gira.nl

10410936 100 / 01.04.2011

Veiligheidsaanwijzingen

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kan er schade aan het apparaat, brand of andere gevaren ontstaan.

Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet aan de eindgebruiker worden overhandigd.

Levering

Kamermodule met signaallamp en bedidentificatie (art. nr.: 2921 ..) voor montage in een inbouwdoos.

Neem de uitvoerige installatieinstructies in acht in de volledige handleiding, te vinden onder:
www.download.gira.de

Garantie


De wettelijk vereiste garantie wordt uitgevoerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/ installatiebedrijf) overhandigen of portvrij opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Deutschland

Apparaataanzicht

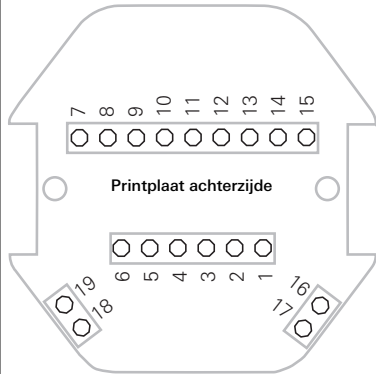

Aansluitconfiguratie

Voeding

3	GND	aarde
4	GND	aarde
5	+ 24 V	voedingsspanning
6	+ 24 V	voedingsspanning

Groepsbus

1	GBUS-	dataleiding (-in)
2	GBUS+	dataleiding (+out)

Toilet

15	+ 24 V_out	spanning (afgezekerd)
11	RTWC	oproepknop toiletproep
12	RLWC_2	oproeplamp toiletproep met lokaliseerverlichting
13	ATWC	uitschakelknop toiletproep

Kamer

15	+ 24 V_out	spanning (afgezekerd)
14	SU	zoemer (out)
9	AT1	aanwezigheidsknop
10	AL	LED in aanwezigheidsknop
7	RT	oproepknop (in)
8	RL	LED in oproepknop (out)
16	IN_2	oproepactivering bed 2 (in)
17	OUT_2	LED in oproepknop bed 2 (out)
18	IN_1	oproepactivering bed 1 (in)
19	OUT_1	LED in oproepknop bed 1 (out)

Aansluiten op:

Aansluiten van:

Groepsbus

Oproepknop, oproepknop met nevensteekcontact, trekdrukcontact en pneumatische oproepknop, aanwezigheidsknop, uitschakelknop toiletproep.

Aanwijzing:

JP 1 op de laatste busdeelnemer sluiten.

Meer informatie:

Bekabeling van de oproepactiveringscomponenten, zie volledige handleiding
Bekabeling van de oproeputschakelcomponenten, zie volledige handleiding
Bekabeling in de kamer, zie volledige handleiding
Bekabeling in het toilet (natte cel), zie volledige handleiding
Bekabeling van de groepsbusdeelnemers, zie volledige handleiding
Beschrijving van de oproepdoorschakelfunctie, zie volledige handleiding