

Kamermodule met
signaallamp
2922 ..

GIRA

Oproepsysteem 834

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie-
systemen
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald
Germany
Tel. +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-339
www.gira.nl
info@gira.nl

10410937 I00 / 01.04.2011

Veiligheidsaanwijzingen

Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kan er schade aan het apparaat, brand of andere gevaren ontstaan.

Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet aan de eindgebruiker worden overhandigd.

Levering

Kamermodule met signaallamp
(art. nr.: 2922 ..) voor montage in een
inbouwdoos.

Neem de uitvoerige installatieinstructies in
acht in de volledige handleiding, te vinden
onder:
www.download.gira.de

Garantie


De wettelijk vereiste garantie wordt uitge-
voerd via de vakhandel.

Een gebrekkig apparaat kunt u met een
omschrijving van de fout aan de betreffende
verkoper ((elektrotechnische) vakhandel/
installatiebedrijf) overhandigen of portvrij
opsturen.

Deze stuurt het apparaat door naar het Gira
Service Center:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Deutschland

Apparaataanzicht

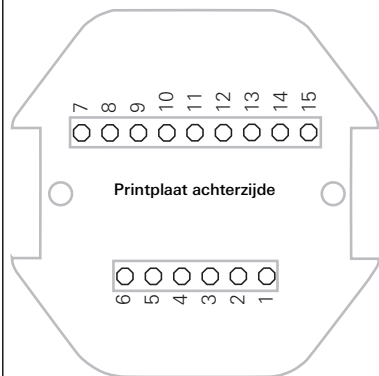

Aansluitconfiguratie

Voeding

3	GND	aarde
4	GND	aarde
5	+ 24 V	voedingsspanning
6	+ 24 V	voedingsspanning

Groepsbus

1	GBUS-	dataleiding (-in)
2	GBUS+	dataleiding (+out)

Toilet

15	+ 24 V_out	spanning (afgezekerd)
11	RTWC	oproepknop toiletoproep
12	RLWC_2	oproeplamp toiletoproep met lokaliseerverlichting
13	ATWC	uitschakelknop toiletoproep

Kamer

15	+ 24 V_out	spanning (afgezekerd)
14	SU	zoemer (out)
9	AT1	aanwezigheidsknop
10	AL	LED in aanwezigheidsknop
7	RT	oproepknop (in)
8	RL	LED in oproepknop (out)

Aansluiten op:

Aansluiten van:

Groepsbus

Oproepknop, oproepknop met nevensteekcontact, trekdrukcontact en pneumatische oproepknop, aanwezigheidsknop, uitschakelknop toiletoproep.

Aanwijzing:

JP 1 op de laatste busdeelnemer sluiten.

Meer informatie:

Bekabeling van de oproepactiveringscomponenten, zie volledige handleiding
Bekabeling van de oproeputschakelcomponenten, zie volledige handleiding
Bekabeling in de kamer, zie volledige handleiding
Bekabeling in het toilet (natte cel), zie volledige handleiding
Bekabeling van de groepsbusdeelnemers, zie volledige handleiding
Beschrijving van de oproepdoorschakelfunctie, zie volledige handleiding